

Les éléments du système de soins:



Manche universel
N° d'article/PZN 1509556 (42 cm l)
N° d'article/PZN 2461248 (57 cm l)



Manche courbé universel
N° d'article/PZN 2461260



Coussinet pour étaler la crème
N° d'article/PZN 051.6666



Coussinet un peu plus élevé
d'un côté pour étaler la crème
N° d'article/PZN 1839555



Eponge de soin
N° d'article/PZN 051.6689



Brosse de soin
N° d'article/PZN 051.6672



Ustensile pour nettoyer
les pieds et les orteils
N° d'article/PZN 1839578



Lime contre la callosité
N° d'article/PZN 2461277



Rouleau de massage
N° d'article/PZN 1839561



Miroir
N° d'article/PZN 4120310



Système de fixation
N° d'article/PZN 1839609



Fixation murale
N° d'article/PZN 41.40904



Lime contre la collosité
fixé au manche universel



Ustensile pour nettoyer les
orteils fixé au manche universel



Changement aisé de la brosse



Utilisation d'un manche courbé


Indication d'entretien et de maniement:

- Pour nettoyer le coussinet, il suffit de le nettoyer à l'eau chaude
- Il faut enlever l'éponge mouillée en tirant vers le bas sur la fixation velcro.
- Il ne faut pas laisser l'éponge mouillée sur le manche en bois


Le siège social de la société la « PFLEGEHAND » (la main qui propage des soins) est située à Breitengüßbach près de Bamberg

www.pflegehand.de · info@pflegehand.de

Est en vente chez:

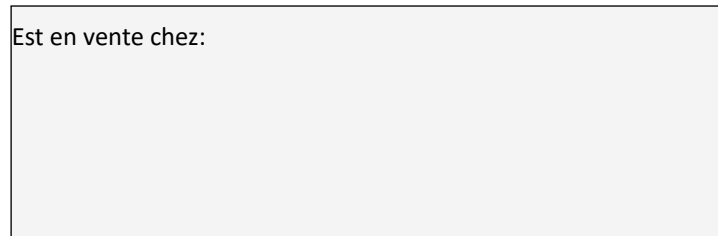

f

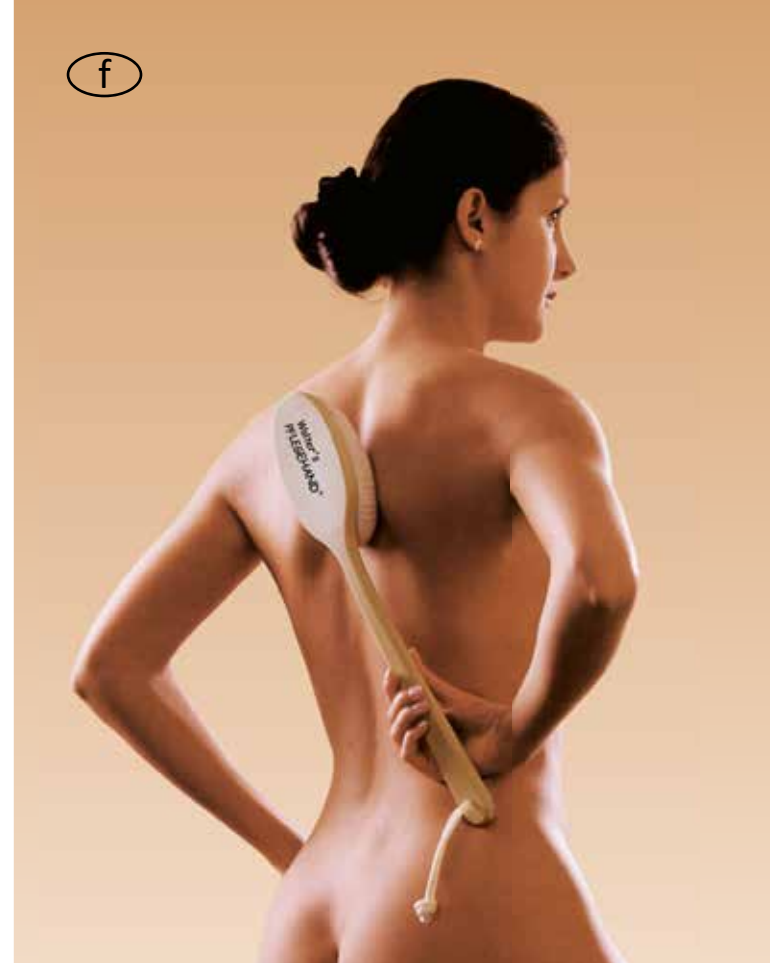

Walter's
PFLEGEHAND®

une façon simple, innovatrice qui a fait ses preuves
et qui sert étaler la crème

Soins pour l'ensemble du corps

Les soins apportés à notre corps dans notre vie quotidienne sont particulièrement importants, mais ils ne sont pas toujours faciles à effectuer.

Nous, l'entreprise « **Walter's PFLEGEHAND®** » (la main qui soigne) avons développé pour vous un système de soins très élaboré, afin que l'application de vos soins soit facilitée.

Vous pouvez maintenant sans problème et sans aide étrangère vous laver, vous brosser, étaler une crème, etc.

A cet effet, vous choisissez selon vos propres besoins un manche en bois esthétique et adapté à votre corps.

La longueur des manches varie entre 42 et 57 cm. Vous obtenez aussi des manches courbés. Les manches en bois sont traités avec une huile biologique d'une certaine consistance, de cette manière le bois résiste à l'eau et la surface conserve son naturel.

Avec cette « main rallongée » vous atteignez sans effort toutes les parties du corps, en particulier le dos.

L'attrait de ce système de soins repose sur son système d'éléments fonctionnels interchangeables:

Grâce à sa fermeture velcro on peut fixer au manche en bois les différents éléments de soin et ils sont facilement interchangeables.

De conception exceptionnelle, le coussinet recouvert d'un film spécial étanche à l'humidité et neutre pour la peau permet de l'enduire de crème.

Très économe à l'emploi vous pouvez appliquer sans problème, doser finement vos crèmes de soin et vos pommades sur tout le corps.

Sur la surface légèrement striée les crèmes, les pommades ou les lotions adhèrent parfaitement et vous ressentez lors de l'utilisation un léger et très agréable massage.

Walter's PFLEGEHAND® « la main qui propage des soins » vous procure une très bonne sensation quant à votre hygiène corporelle.



Les éléments de soins en détail:

- **Les coussinet innovateur pour étaler la crème** soit dans sa forme originale ou un peu plus élevé d'un côté a fait ses preuves pour appliquer les crèmes et les produits médicaux
- **L'éponge** pour se laver et se masser légèrement
- **La brosse** avec des poils synthétiques cliniquement propres peut être utilisée comme brosse sèche ou humide et même pour le sauna
- **Accessoire pour pieds et orteils** avec lequel vous pouvez vous laver, vous sécher et étaler de la crème entre les orteils
- **Rouleau de massage** vous pouvez l'utiliser de différents manières, soit avec le manche à en bois, soit avec la fixation, soit le poser par terre et l'utiliser pour masser la plante des pieds
- **Lime contre la callosité** elle est constituée d'une surface de frottement fine et une autre un peu plus rugueuse, elles sont interchangeables grâce à un ruban adhésif double face
- **Miroir** fixé au manche en bois il sert à contrôler sans l'aide d'une tierce personne la plante des pieds. Il est d'une grande utilité pour les diabètes
- **Fixation ajustable** elle vous permet grâce à la fermeture velcro d'avoir en main le système complet de soins sans utiliser le manche en bois
- **Fixation murale** sans percer de trou une fixation murale est possible. De cette façon tous les éléments de soins sont à portée de main

Il suffit de déposer sur le coussinet la quantité de pommade, d'huile, de lotion ou de crème nécessaire pour pouvoir l'appliquer sur le corps



- Label: « à recommander »

Walter's PFLEGEHAND® (la main qui propage des soins) a été soumise à des tests médicaux élaborés. Des dermatologues lui ont octroyé le label « à recommander ».

La main accroît votre mobilité et votre indépendance, elle améliore à l'aide d'un simple moyen votre qualité de vie.

Walter's PFLEGEHAND® (la main qui propage des soins) votre aide quotidienne, qui fait preuve d'innovation, est fabriquée en Allemagne et répond aux exigences sanitaires.

